

CE 2834



Käyttöohje

Käyttöohjeiden ja rajoitusten noudattamatta jättäminen voi heikentää olennaisesti tämän hengityssuojaimen suodatustehokkuutta ja voi johtaa sairastumiseen, loukkaantumiseen tai kuolemaan. Työnantajan on koulutettava käyttäjää hengityssuojaimen oikean käytön suhteen sovellettavien turvallisuus- ja terveysstandardien mukaisesti.

1. Hävitä hengityssuojain ja vaihda se uuteen, jos: a. hengityssuojain aiheuttaa hengitysvaikeuksia. b. hengityssuojain vaurioituu.
2. Älä modifioi tai käytä hengityssuojainta väärin.
3. Älä käytä hengityssuojainta parran kanssa tai tilanteissa, jotka estävät hengityssuojaimen tiiviin istumisen kasvoja vasten ja vuotovaatimusten saavuttamista.
4. Hengityssuojain on tarkistettava ennen jokaista käyttöä sen varmistamiseksi, että hengitysalueella ei ole muita reikiä kuin lävistykset ja niitit ja ettei hengityssuojain ole vaurioitunut. Repeämästä tai repeytyneestä suodatinmateriaalista johtuvia laajentuneita reikiä niittien lävistysten ympärillä pidetään vaurioina.
5. Tämä hengityssuojain auttaa suojautumaan tietyiltä hiukkasmaisilta ilman epäpuhtauksilta, mutta ei poista riskiä altistumisriskiä tai tartuntariskiä. Väärinkäyttö voi johtaa sairauteen tai kuolemaan.
6. Tätä hiukkassuodattavaa suojainta, jossa on merkintä "NR", saa käyttää vain yhden työvuoron ajan.

ASENNUSOHJE

1. Aseta sormet hengityssuojaimen korvalenkkiin sisälle. Taivuta nenäpidike sormien ympärille muodostaen nenän muodon.
2. Asenna kiinnityspidike kiinnitysnauhaan.
3. Aseta hengityssuojain paikoilleen, niin että se peittää nenän ja suun.
4. Vedä kiinnitysnauhat pään taakse ja kiinnitä pidike toiseen kiinnitysnauhaan.
Huomaa: Samalla puolella olevien kiinnitysnauhojen tulisi ylittää korvan ylä- ja alapuolella.
5. Käytä molempia käsiä, aseta nenäklipsi nenän ympärille ja aseta kiinnitysnauhat varmistaen, että suojain istuu tiukasti kasvoja vasten.
6. Tarkista hengityssuojaimen tiiveys, asettamalla molemmat kädet hengityssuojaimen päälle ja hengitä voimakkaasti. Jos nenän alueella tuntuu ilmavirtausta, säädä nenäpidike uudelleen ja kiristä se. Jos hengityssuojaimen reunojen ympärillä on virtauksia, säädä hengityssuojainta / kiinnitysnauhoja paremman istuvuuden saavuttamiseksi.
7. Vaihda hengityssuojain heti, jos hengitys vaikeutuu tai hengityssuojain vaurioituu tai sen väri muuttuu.
8. Vaihda hengityssuojain, jos kasvot se ei istu kunnolla kasvoja vasten.


9. Noudattamalla huolellisesti näitä ohjeita käytät hengityksensuojainta mahdollisemman turvallisella tavalla.

Hengityssuojain täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. Suojain on testattu standardin EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR mukaisesti. Moduulin B (EU-tyyppitarkastustodistus) ja moduulin C sertifikaatin on myöntänyt CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland (NB 2834).

Valmistaja: Jinhua City Shengjie Labor Products Factory Osoite: Shankoufeng, Chisong Town, Jinhua, Zhejiang, P.R. China

Valmistuspäivä: katso pakkaus

Viimeinen käyttöpäivämäärä: katso pakkaus

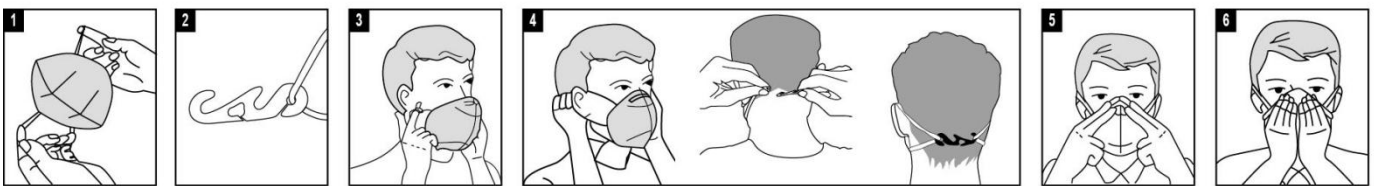

Manuell

Underlåtenhet att följa instruktionerna och begränsningarna kan försämra andningsapparatens effektivitet avsevärt och kan leda till sjukdom, personskada eller dödsfall. Arbetsgivaren måste utbilda användaren i enlighet med tillämpliga säkerhets- och hälsostandarder för korrekt användning av andningsskyddet.

1. Kasta andningsskyddet och byt ut det mot ett nytt om: a. Andningsskyddet orsakar andningssvårigheter. b. Andningsskydd är skadat.
2. Ändra inte eller använd inte andningsskyddet.
3. Använd inte andningsskyddet med skägg eller i situationer som förhindrar att andningsskyddet sitter tätt mot ansiktet och uppfyller läckagekraven.
4. Andningsskyddet måste inspekteras före varje användning för att säkerställa att det inte finns några hål i andningsområdet annat än piercingar och nitar och att andningsskyddet inte skadas. Expanderade hål runt nitgenomträngningar på grund av brustet eller sönderrivet filtermaterial anses vara skada.
5. Denna andningsskydd hjälper till att skydda mot vissa partikelformiga luftföroreningar, men eliminerar inte risken för exponering eller infektion. Missbruk kan leda till sjukdom eller död.
6. 6. Denna partikelfilterhalvmask märkt "NR" får endast bäras under ett skift.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

1. Placera fingrarna i andningsskyddets öronskydd. Böj näsklämman runt fingrarna för att bilda en näsform.
2. Installera monteringsfästet på monteringsremmen.
3. Sätt andningsskyddet på plats så att det täcker näsan och munnen.
4. Dra i remmarna bakom huvudet och fäst klämman på de andra remmarna. Obs! Remmen på samma sida ska sträcka sig över och under örat.
5. Placera en näsklämma runt näsan med båda händerna och placera remmarna och se till att skyddet sitter tätt mot ditt ansikte.

6. 6. Kontrollera att andningsskyddet inte läcker genom att placera båda händerna på andningsskyddet och andas kraftigt. Om det finns luftflöde i näsan, justera näsklämman och dra åt den. Om det finns strömmar runt respiratorns kanter, justera andningsskyddet / remmarna för en bättre passform. Byt ut andningsskyddet omedelbart om andningen blir svår eller andningsskador är skadade eller missfärgade.
7. Byt ut andningsskyddet om det inte sitter ordentligt mot ansiktet.
8. Genom att följa dessa instruktioner noggrant kommer du att använda andningsskyddet så säkert som möjligt.

Andningsskyddet uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. Skyddet har testats i enlighet med EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR. Modul B (EU-typintyg) och Modul C-certifiering har utfärdats av CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland (NB 2834).

Tillverkare: Jinhua City Shengjie Labor Products Fabriksadress: Shankoufeng, Chisong Town, Jinhua, Zhejiang, P.R. Kina

Tillverkningsdatum: se förpackning

Utgångsdatum: se förpackning